

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CEYE

Objetivo

Establecer los lineamientos normativos y organizacionales necesarios para proporcionar el servicio de esterilización de material e instrumental a los alumnos que pertenecen a la Escuela de Estomatología.

Normas y Políticas de Operación
--

- Corresponde a la Dirección de la Escuela de Estomatología el decidir sobre las condiciones de operación de la CEYE.
- Las funciones del responsable de la CEYE se enlistan a continuación:
 - Llevar a cabo el proceso de esterilización de instrumental quirúrgico o exploratorio de los alumnos mediante el uso de autoclaves, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:
 - Se encuentre debidamente empaquetado de manera individual, ya sea en bolsas con una cara transparente, cajas de esterilización o campos.
 - En caso de utilizar envases de vidrio con tapa metálica, el cierre no deberá ser hermético, si no sobreponer la tapa y colocar cinta adhesiva.
 - Para esterilizar limas se utilizarán tubos de esterilización con tapa enroscable.
 - Cada paquete deberán estar marcados con nombre y número de registro de entrada.
 - Recibir el instrumental a esterilizar asegurándose de que cumplan con las características establecidas.
 - Llevar el control de los paquetes registrando la fecha de esterilización y caducidad, el código del autoclave y número de carga del turno.
 - Colocar cinta testigo en cada paquete.
 - Introducir un paquete muestra por cada carga.
 - Introducir al autoclave con las siguientes características:
 - Separación entre cada paquete de 3 cm aproximadamente.
 - No colocar paquetes o bultos uno encima de otro.
 - Si se trata de cajas deberán de introducirse sin tapa, envueltas en campos y colocarse de canto.
 - Organizar y almacenar momentáneamente el instrumental estéril.
 - Otorgar el material esterilizado de acuerdo a los lineamientos y horarios establecidos.
 - Aplicar pruebas biológicas y químicas para la comprobación del proceso de esterilizado y facilitar su registro.
 - Revisar que los procedimientos se realicen en orden y bajo los lineamientos establecidos.
 - Solicitar semanalmente al almacén en forma y tiempo establecido el material que utilice en su área.

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CEYE

- Llevar a cabo el encendido, llenado y purgado de los equipos de esterilización, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
- Revisar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, registrándolo debidamente en la bitácora correspondiente.

Alcance

Este procedimiento aplica para la CEYE, dependiente de las Clínicas de la Escuela de Estomatología de la Universidad Justo Sierra.

Definiciones

C.E.Y.E: Según la NOM-197-SSA1-2000, se refiere al conjunto de espacios arquitectónicos con características de asepsia especiales, con áreas y equipos específicos donde se lavan, preparan, esterilizan, guardan momentáneamente y distribuyen, equipo, materiales, ropa e instrumental utilizados en los procedimientos médicos quirúrgicos, tanto en la sala de operaciones como en diversos servicios del hospital.


Descripción de Narrativa		
Responsable	Actividad	Documentos Involucrados
Alumno	Inicio del procedimiento 1. Ingresa alumno a subceye portando su instrumental sucio dentro de contenedores de plástico con tapa. Procede al lavado mecánico en las tarjas y colocando un campo de tela limpio sobre la mesa, escurre y seca el instrumental con aire a presión. Continúa con su correcto empaquetado sobre la mesa de trabajo. Finalmente marca cada paquete con nombre y número de registro de entrada para después entregar en CEYE. ¿El alumno entrega sus paquetes con los requisitos establecidos? Sí	Bitácora de Registro de Entrada a CEYE
Responsable de CEYE	2. Recibe los paquetes que cumplan con los requisitos establecidos para posteriormente colocarlos dentro del autoclave correspondiente y continuar con el proceso de esterilización. Deberá marcar cada paquete con fecha de esterilización y caducidad, así como la clave del equipo y el número de carga por turno. No	
	3. Rechaza los paquetes hasta que cumplan con los requisitos.	

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CEYE

Auxiliar de Laboratorio (microbiología) Jefe de Clínicas	4. Previo al cierre del equipo colocará el reactivo biológico junto con la carga cuando así se agende. 5. Terminado el ciclo de esterilizado y secado, colocará los paquetes sobre el anaquel de transición para después almacenarlos temporalmente en los anaqueles correspondientes. 6. Entregará los paquetes a los alumnos con respecto al registro de entrada. 7. En caso de que el reactivo biológico vire, se mandará de inmediato el paquete PRUEBA a laboratorio de microbiología y se avisará de inmediato a Jefe de Clínica 8. Cultivará el paquete y mandará el informe a Jefe de Clínica. 9. Reportará el resultado y tomará las medidas pertinentes con respecto a la revisión y mantenimiento correctivo de autoclaves.	
	Fin del Procedimiento	

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA

PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CEYE

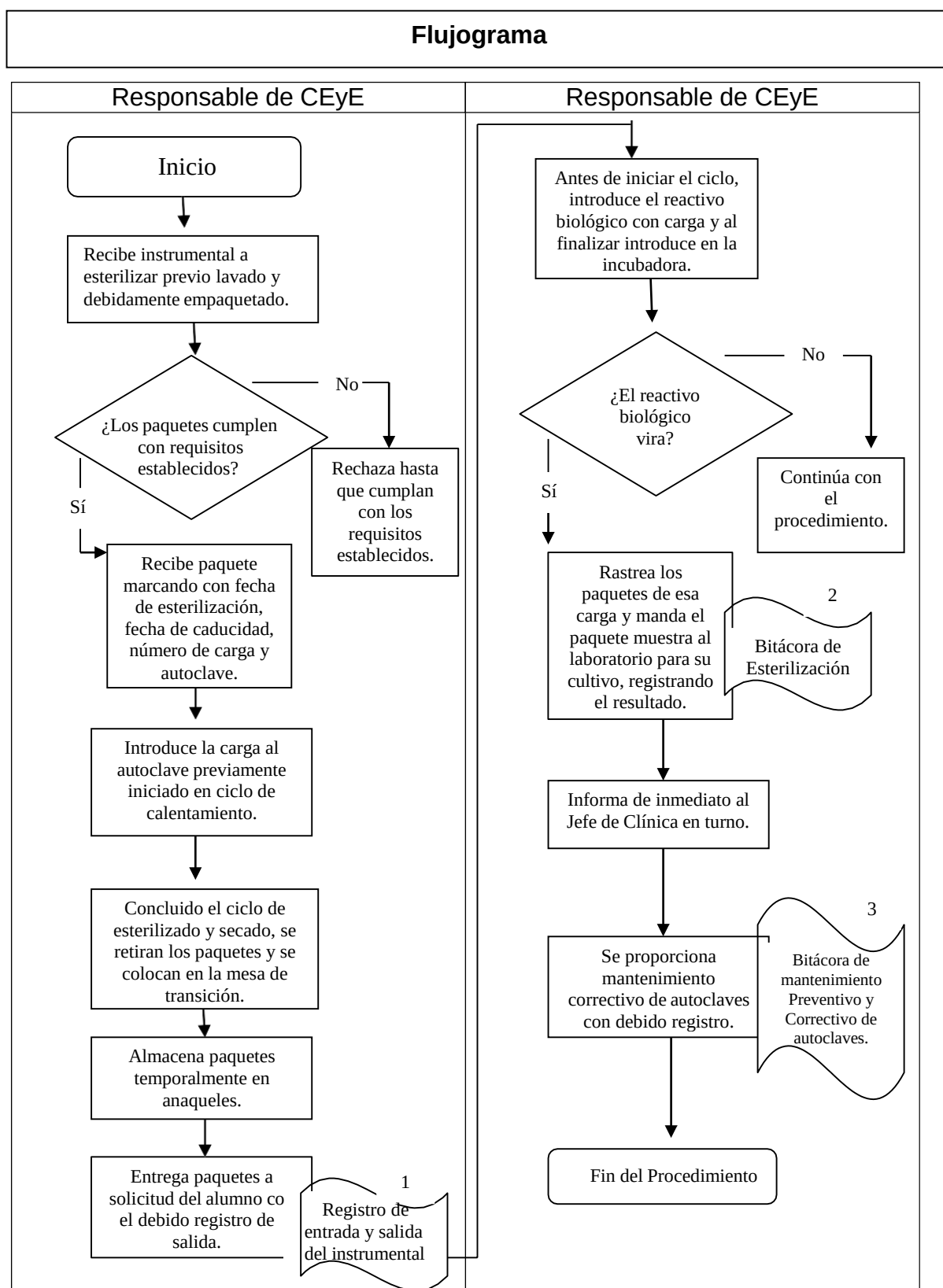



ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CEYE

Formatos e Instructivos de Llenado

Control de pruebas de esterilización en autoclaves

UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA

ESTOMATOLOGIA

CONTROL DE PRUEBAS DE ESTELIZACION EN AUTOCLAVES

FECHA	AUTOCLAVE	RESULTADO	COMENTARIOS

UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
REGISTRO DE INSTRUMENTAL EN CEYE

Folio	Nombre del alumno	No. de sobres	Fecha de entrada	Hora	Firma de entrada	Fecha de salida	Firma salida

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA
PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CEYE
UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
ESTOMATOLOGÍA

BITÁCORA DE REVISIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS

<i>FECHA</i>	<i>SUPERVISA</i>	<i>COMENTARIOS</i>

UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA
PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO
CEYE PARA ALUMNOS
CICLO 2024-2



Justo Sierra
UNIVERSIDAD

1. Portar el uniforme correspondiente.
2. El alumno deberá contener el instrumental contaminado dentro de un toper con tapa hermética (proporcionado por las clínicas) al final de su trabajo en clínica. dicho contenedor deberá de limpiarse y entregarse en la central correspondiente.
3. Los contenedores se transportarán sellados hasta el área roja de CEYE en donde se procederá al lavado.
4. El lavado mecánico debe ser con jabón quirúrgico y cepillo, con el uso indispensable de guantes de látex gruesos.
5. Secar el instrumental limpio con aire sobre campos de tela cabeza de indio azul limpios.
6. Empaquetar el instrumental en bolsas o campos en la mesa central.
7. Marcar los paquetes con el numero que corresponda al registro de entrada de instrumental.
8. Las cajas o envases para esterilizar no deben taparse y se cubrirán con campos con el dobles hacia la parte abierta de la caja.
9. Para esterilizar limas de endodoncia se usaran tubos especiales con tapa enroscable conteniendo solución o agua potable hasta el indicador.
10. El instrumental estéril deberá ser recogido el mismo día.
11. Para utilizar el instrumental es de vital importancia verificar la fecha de caducidad marcada en el paquete.
12. En caso de que el Jefe Clínica indique no utilizar el instrumental por sospecha de que el proceso de esterilización no se llevo a cabo satisfactoriamente se repetirá el procedimiento.